

SkyTeks



GELECEK BURADA

Siyanoakrilat Doku yapıştırıcıda
SON TEKNOLOJİ...

INDERMIL[®]
flexifuze[™]

Made in Ireland.


connexicon
medical

YENİ NESİL YENİ JENERASYON

Muadillerinin arasında
En iyi doku yapıştırıcısı

INDERMIL® flexifuze™ doktorlar ve tıp
teknisyenlerinin kullanımında kolaylıklar
sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ergonomik yapısı ile tedavi süreçleri
artık çok daha hızlı...

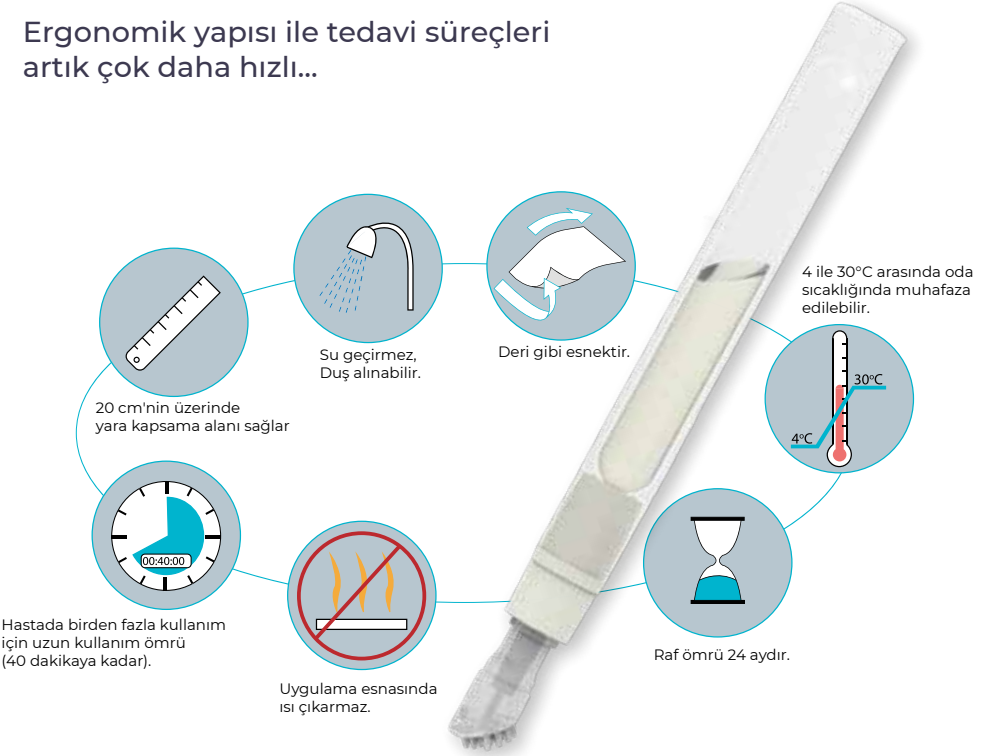

NEDEN

INDERMIL® flexifuze™

Kullanıma hazır ergonomik yapısıyla,
en son teknolojiyle üretilmiştir.

HASTA İÇİN FAYDALARI

I Deri gibi esnek

İkincil deri gibi yumuşak ve rahat bir his verir.

I Duş alınabilir

Hasta hergün duş alabilir.

I Hastayı endişelendirmez ve acısızdır

Sütüre veya zimbalamaya gerek kalmaz.

I Mükemmel kozmetik sonuç

Dokuda minimum travma yaratır ve yara izi bırakmaz.

I Renk Bozukluğu yapmaz

Formülünde renklendirici olmadığından doku rengini değiştirmez.

I Mikroplara karşı bariyer

Enfeksiyon riskini azaltır.

I Minimum ekzoterm

Çok az ekzotermic reaksiyon'a sebep olur.

DOKTOR İÇİN FAYDALARI

I Akış kontrol aplikatörü

Maksimum doku kaplama alanı sağlamak için patent korumalı aplikatör.

I Kanül aplikatörü

Gerekli olduğunda kanül aplikatörü ile beraber kullanılabilir.

I Hızlı ve kolay uygulama

30 - 60 saniye içinde kurur.

I Tıkanma önleyici uç

Ürün açıldıktan sonra operasyon sırasında 20 dakika boyunca kullanılabilir.
Böylelikle tek hasta üzerinde birden fazla kez kullanımı mümkündür.

I Mikrobiyel Bariyer

Doku üzerinde 5-8 gün arası kalır ve mikrobiyel bariyer görevi görür.


I Yaralanmaya karşı bariyer

İğne batması kaynaklı yaralanmaların önüne geçer

NASIL KULLANILIR?


INDERMIL® flexifuze™ laparoskopik kesitler ve travma kaynaklı yırtılmalar da dahil olmak üzere deri yaralarının kapatılması için tasarlanmıştır.

1. ADIM

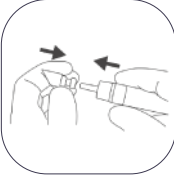

Eğer gerekiyorsa akış kontrol aplikatörünü takın.

2. ADIM

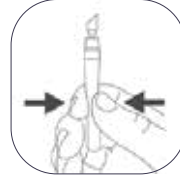

Doku uçlarını birbirine yakınlaştırın.

3. ADIM



Ürünü baş aşağı gelecek şekilde tutun. Baş parmak ve işaret parmağınızla sıkıştırarak cam ampülü kırın.

4. ADIM



Yara boyunca yapıştırıcıyı ince bir katman olarak sürün. Kapanan yarayı 60 saniye boyunca elinizle tutun. 0,75 ml olan tüp 20 cm uzunlukta bir yarayı kapatabilir.

INDERMIL® flexifuze™

Ergonomik yapısı ile tedavi süreçleri artık çok daha hızlı...


INDERMIL® flexifuze™

Made in Ireland.




Diğer tedavi yöntemleriyle kıyaslayın!

Geleneksel yara kapatma yöntemi

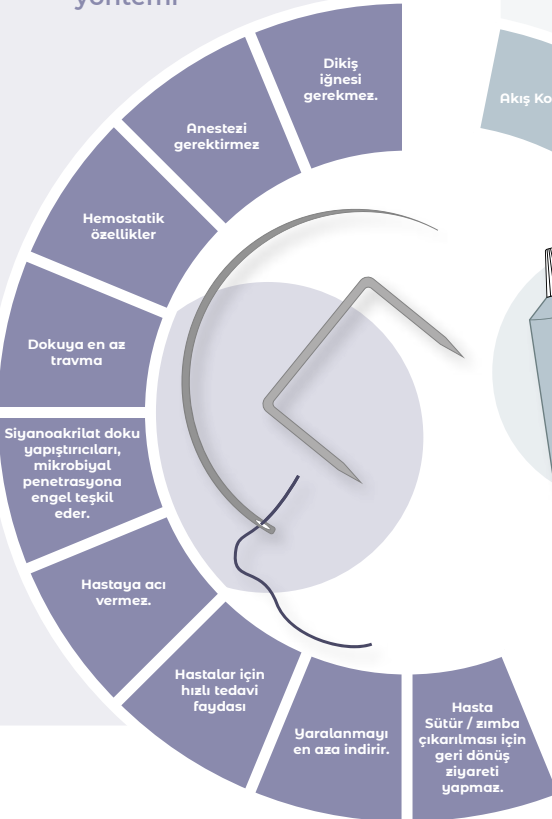

Diğer Doku Yapıştırıcılar

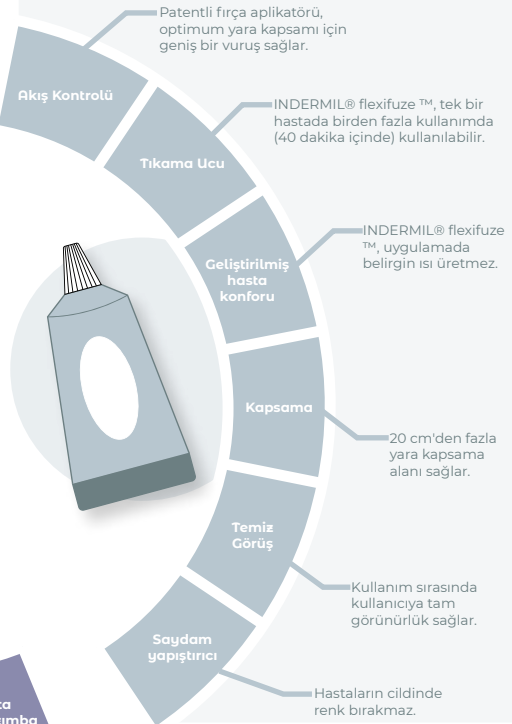

connexicon
medical

SkyTeks

KURUMSAL İHTİYAÇLAR İÇİN KURUMSAL YAKLAŞIM

Liderliğini ve güvenilirliğini koruma, geliştirme vizyonuna sahip olan **Skyteks** kalite ve sürdürülebilirlik politikalarına daima önem vermektedir. Sürekli araştırmaları ve yenilikleri ile müşterilerinin ürün farklılığı ve marka bilinirliklerini artırmaktadır.

INDERMIL® flexifuze™

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kodu	CM001
Açıklama	INDERMIL® flexifuze™ Topical Doku Yapıştırıcı
Paketleme	x12 - 0.75ml ampullük kutularda

Detaylı Bilgi İçin

TANIŞALIM



Skyteks Tekstil Sağlık ve Matbaa Malz. San. Tic. Ltd. Şti.

Oruçreis Mh. Barbaros Cd. 19. Sk. No: 14-16
Giyimkent C-2-Blok B.207 No: 122-123
34235 – Esenler / İSTANBUL

+90 212 438 76 10

+90 212 438 76 14

skyteks@skyteks.net

www.skyteks.net

connexicon
medical
www.connexiconmedical.com

