

SkyTeks

KULLANIM TALİMATI Gazlı Bez

Tıbbi Gaz Kompres *Steril

- %100 Pamuklu, Hidrofilidir.
- TSE EN 14079'a uygundur.
- Kullanım Şekli : Açılan steril gazlı bez steril edilmiş bir pensle tutulmalı, pens yoksa sabunlu su ile eller tamamen yıkandıktan sonra kullanılmalıdır.
- Kullanıldığı Yerler : Ameliyat yaralarının, diğer önemli yaraların ve yanıkların pansumanında kullanılır.
- Paket içerisindeki malzemenin kullanım öncesi ve sonrasında sayılması önerilir.
- Rutubet, ışık, aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.
- Seri no, sterilizasyon tarihi ve sterilizasyon metodu ambalaj üzerine yazılmıştır.
- Son kullanım tarihi steril tarihinden itibaren 5 yıldır.
- Yırtık ve delik ambalajlar steril değildir.

Tıbbi Gaz Kompres *Non-Steril

- %100 Pamuklu, Hidrofilidir.
- TSE EN 14079'a uygundur.
- Kullanım Şekli : Kullanılmadan önce steril edilmelidir. Açılan steril gazlı bez steril edilmiş bir pensle tutulmalı, pens yoksa sabunlu su ile eller tamamen yıkandıktan sonra kullanılmalıdır.
- Kullanıldığı Yerler : Ameliyat yaralarının, diğer önemli yaraların ve yanıkların pansumanında kullanılır.
- Paket içerisindeki malzemenin kullanım öncesi ve sonrasında sayılması önerilir.
- Rutubet, ışık, aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.
- Seri numarası ambalaj üzerine yazılmıştır.



Detaylı Bilgi İçin TANIŞALIM

Skyteks Tekstil Sağlık ve Matbaa Malz. San. Tic. Ltd. Şti.

Oruçreis Mh. Barbaros Cd. 19. Sk. No: 14-16
Giyimkent C-2-Blok B.207 No: 122-123
34235 - Esenler / İSTANBUL

+90 212 438 76 10

+90 212 438 76 14

skyteks@skyteks.net

www.skyteks.net

